



LABO **XXL** Genetics

ODBĚR SPECIÁLNÍHO BUKÁLNÍHO STĚRU

- K zabránění kontaminace odebraného bukálního stěru cizí DNA je zapotřebí, aby testované zvíře mělo **1-2 hodiny před odběrem hladovku**, resp. nesálo mateřské mléko. Dále doporučujeme **1-2 hodiny před odběrem oddělení testovaného jedince** od dalších zvířecích členů domácnosti.
- Opatrně otevřete obal stěrky. Dbejte na to, abyste se nedotkli spodního (testovacího) konce stěrky nebo se jím nedotkli jiných předmětů.
- Odběr proveďte důkladným **třením stěrky o tvář po dobu minimálně 10 sekund**, přitom stěrku otáčejte, abyste zajistili odběr dostatečného množství buněčného materiálu. Genetický test je možné provést pouze v případě, že je na stěrce dostatečné množství buněčného materiálu. Samotné sliny k provedení testu nestačí!
- Držte zkumavku ve vzpřímené poloze a odšroubujte uzávěr. Dejte pozor, abyste se nepotřísnili tekutinou ze zkumavky nebo nevdechli aerosol. Při kontaktu s kůží ji rychle omyjte velkým množstvím vody.
- Stěrku umístěte do zkumavky a zlomte ji v předem ztenčeném místě, poté na zkumavku se stěrku nasadte uzávěr a pevně ho zašroubujte.
- **Zkumavku čitelně označte** (např. jménem zvířete). Dále na zkumavku **nalepte jeden z dodaných čárových kódů a to ve svislé poloze** (ne kolem dokola zkumavky!). Další čárový kód nalepte na žádanku k odpovídajícímu zvířeti. Přebytné čárové kódy můžete vyhodit. Zkumavku vložte do dodaného obalu od LABOKLINU obsahujícím buničinu.
- Odebraný biologický materiál odešlete společně se žádankou co nejrychleji na naši adresu, přitom platí, že údaje zadané Vámi na žádance se objeví ve výsledku. Proto Vás naléhavě prosíme, aby bylo **písmo výrazné a čitelné**. Zadejte prosím také kompletní údaje ke zvířeti (např. číslo čipu, atd.).